


Die **grip chips™** sind eine neue Entwicklung in der Steuerungstechnologie, die es Nutzern ermöglichen die quick grips, my grips und bevorzugte Griffe und Griffmuster schnell und einfach mit der **i-limb™ ultra revolution** zu aktivieren. Diese Lösung ist instinktiv in der Bedienung und in Verbindung mit der multifunktionalsten Hand auf dem Markt erhältlich. Sie ermöglichen den Nutzern eine Anzahl an verschiedenen Aktivitäten des täglichen Lebens einfach und präzise auszuüben.

Funktionen:

- Eine neue High-Tech Steuerungstechnologie, welche zusätzliche Möglichkeiten gibt die **i-limb™ ultra revolution** zu nutzen und auf Griffe zuzugreifen.¹
- Durch die Platzierung der **i-limb™ ultra revolution** in direkter Nähe des **grip chips™** wird der gewünschte Griff durch ein Bluetoothsignal® aktiviert.
- **my grips™** ermöglicht zusätzlich 12 individuelle Griffe je nach Bedarf zu programmieren.²
- Das Programmieren und Ändern der Griffe erfolgt über die **my i-limb™** oder **biosim™** App.
- Sie sind leicht zu installieren und mit minimalem Training zu handhaben

Wie funktionieren die **grip chips™**:

Patienten können die gewünschten Griffe und Gesten schnell und einfach in die **grip chips™**, über die **my i-limb™** App, einprogrammieren und die **grip chips™** an den gewünschten Ort legen, wo der jeweilige Griff benötigt wird. Durch das Halten der **i-limb™ ultra revolution** in direkter Nähe des **grip chips™** wird die eingespeicherte Funktion aktiviert.

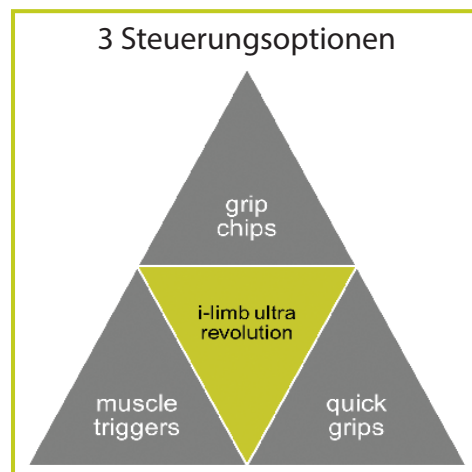

Artikelnummer:	Beschreibung
PL238089	grip chip™ Starterset (1-10)
PL238090	grip chip™ Nachbestellung (11-20)



¹ Ein Softwareupdate und die Aktivierung des Updates sind notwendig, um die **grip chips™** nutzen zu können.

² Weitere Informationen finden Sie unter:
<http://www.touchbionics.de/downloads/document.php>.